


# Stylo autopiqueur VITREX COMPACT

## Notice d'utilisation

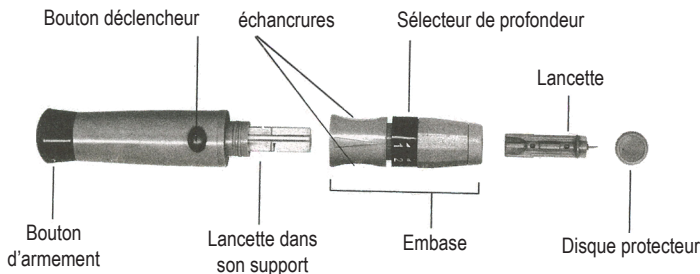

- 1- Dévissez et retirez avec soin **l'embaise** en prenant les **échantures** entre le pouce et l'index. Insérez la lancette dans le **support de lancettes**.
- 2- Retirez le **disque protecteur** de la lancette (tournez légèrement pour rompre le plastique, puis tirez-le en arrière), et remettez **l'embaise** en place.
- 3- Choisissez la profondeur de pénétration en plaçant **le sélecteur** sur la position désirée. Les chiffres les plus élevés correspondent aux piqûres les plus profondes, et donc aux gouttes de sang les plus grosses.
- 4- Tirez à fond en arrière et relâchez **le bouton d'armement**.
- 5- Placez le stylo autopiqueur fermement sur la zone à ponctionner et pressez **le bouton déclencheur**. Vous obtenez une goutte de sang.
- 6- Retirez **l'embaise**, retirez et éliminez la **lancette** usagée (la pointe de la lancette peut être repiquée dans son **disque protecteur** pour plus de sécurité).

Distribué par :  
**DINNO SANTE**  
1 Rue Raoul Follereau, Bussy St Georges  
77 608 Marne la Vallée cédex 3  
www.dinnosante.fr  
0800 697 598

**CE**  
0459

Mandataire pour l'Union Européenne :  
**Vitrex Medical ApS**  
P.O.B. 507, Vasekaer 6-8  
2730 Herlev  
Denmark

M&J 07-08