


Vue d'ensemble des fonctions

Vous êtes perdu ? attendez 20", l'écran revient à son mode de départ.

MODE STOP

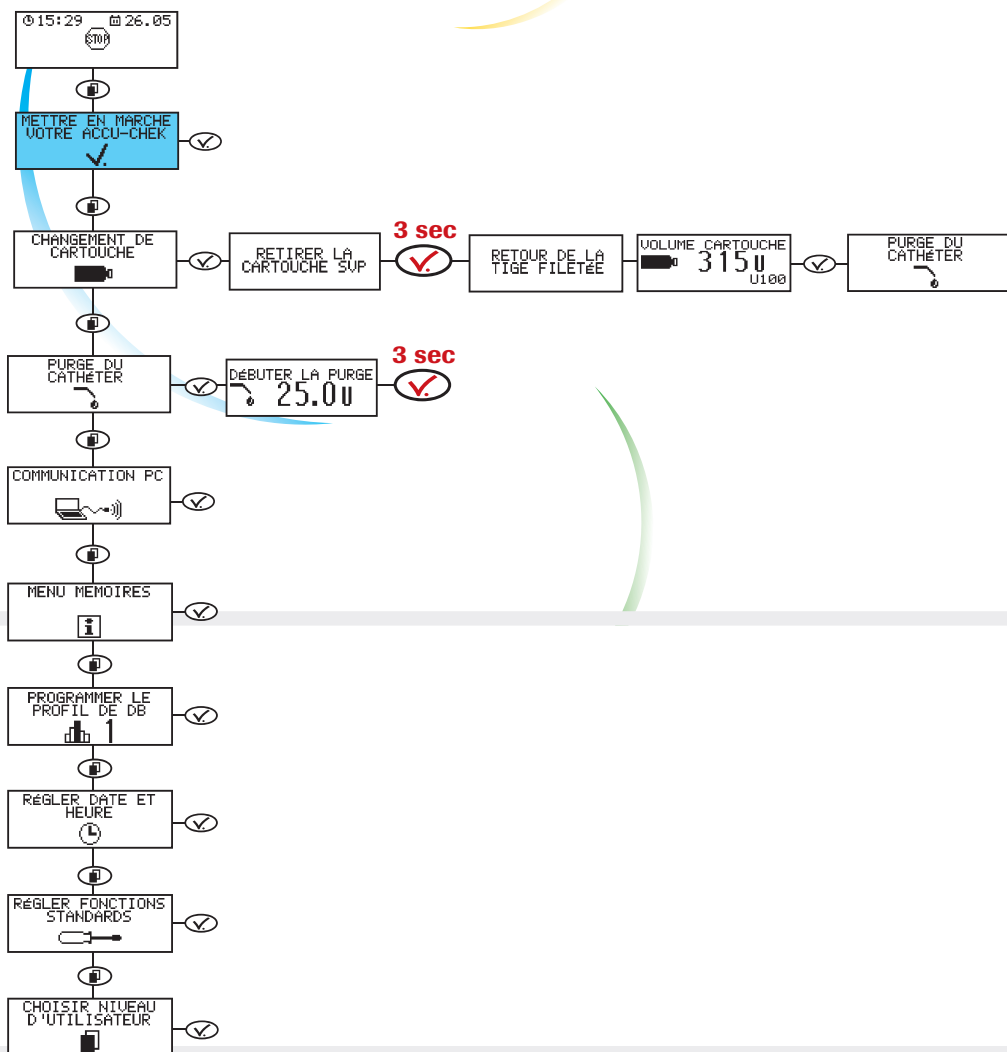


N I V E A U S T A N D A R D

Vue d'ensemble des fonctions

Vous êtes perdu ? attendez 20", l'écran revient à son mode de départ.

MODE MARCHÉ

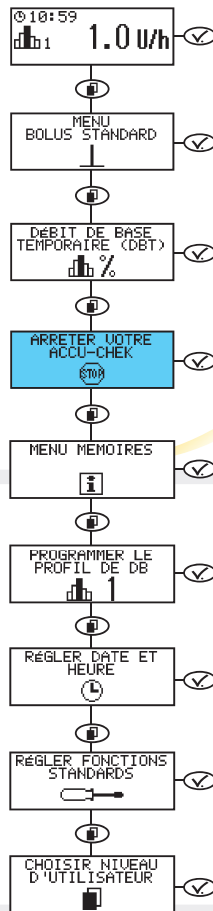

N I V E A U S T A N D A R D



Astuces

Rétro éclairage		
Déverrouillage du verrouillage des touches	3 sec	+
Retour à l'écran précédent		+
Copie un débit de base horaire		+
Désactivation de l'avertissement STOP	3 sec	ou

Après avoir sélectionné un écran de réglage des fonctions ou de consultation des mémoires, appuyer sur la touche pour un retour de la pompe à insuline au mode **MARCHE** ou **STOP**.

Annulation d'un message d'alarme ou d'erreur **2 x**