

Synchroniser le lecteur CareSens™ N Premier avec son smartphone

SmartLog™

Smartphones compatibles : Android 4.1.2 ou ultérieure, iOS 8.0 ou ultérieure. Pour une analyse approfondie des données, le logiciel SmartLog™ est disponible en téléchargement sur le site DinnoSante.fr



SmartLog for iPh...
Forme et santé

OBTENIR



1. Téléchargez gratuitement l'application SmartLog™ depuis l'App Store ou Google Play.



2. Lancez l'application

SMART LOG

Guide de démarrage

Veillez saisir les informations suivantes :

1. Informations de l'utilisateur
2. Unité de glycémie
3. Unité de poids
4. Unité de pression artérielle


Infos utilisateur

Plus tard

3. Entrez vos informations personnelles et programmer vos alarmes de rappel



4. Pressez et maintenez le bouton « S » pendant 3 secondes, SET s'affiche

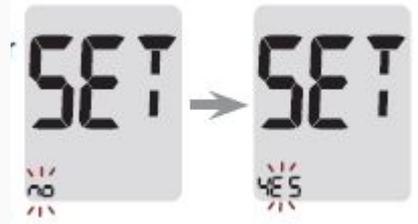

5. Pressez le bouton > ou < pour sélectionner « YES », puis pressez le bouton « S » pour passer à l'étape suivante.




6. "bT" s'affiche, appuyez 3 fois de suite sur le bouton > du lecteur, « PAIR » s'affiche, appuyez sur « S ».



7. Activez la fonction Bluetooth



8. Dans l'application, allez dans "Plus", puis cliquez sur "Accessoires"

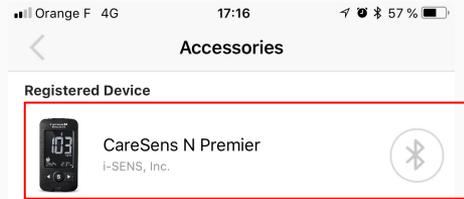

9. Sélectionnez le lecteur CareSens™ N Premier



10. Suivez les étapes indiquées dans l'application, puis sélectionnez le lecteur "CareSens xxxx".



11. Saisissez le code Pin à 6 chiffres qui s'affiche sur le lecteur CareSens™ N Premier sur votre smartphone, puis validez.



12. Le message « SUCCESS » s'affiche sur votre lecteur de glycémie lorsque la synchronisation avec votre smartphone est réussie.

Les résultats de vos tests seront transférés automatiquement vers votre smartphone dès l'éjection de la bandelette.*

*Veillez toujours à ce que le Bluetooth de votre smartphone et de votre lecteur CareSens™ N Premier soient activés.